

KIT PER FLUIDI ORALI

Per la raccolta dei fluidi orali
nei suini.

Conservare all'asciutto.

✓ Il modo più pratico
ed efficace per la
raccolta dei fluidi
orali nei suini.



IL KIT INCLUDE:

-  Corda in cotone
Ø 16 mm - 70 cm
-  Busta conica
per la raccolta
del campione
-  Provetta
con tappo
-  2 fascette
di fissaggio
-  Cordino
Ø 3 mm - 100 cm
-  Guanti
monouso

COME UTILIZZARE IL KIT: 3 SEMPLICI PASSAGGI

1 POSIZIONARE LA CORDA



- ✓ Appendere la corda all'altezza della spalla degli animali.
- ✓ Preferibilmente lontano da muri, mangiatoie e abbeveratoi.
- ✓ Lasciare la corda per 20-30 minuti.

2 RACCOGLIERE IL CAMPIONE



- ✓ Indossare i guanti in dotazione.
- ✓ Inserire l'estremità della corda nella busta collegata alla provetta.
- ✓ Strizzare la corda fino ad ottenere almeno 2,5 ml di campione.

3 INVIARE IL CAMPIONE AL LABORATORIO



- ✓ Chiudere la provetta con il tappo.
- ✓ Identificare il campione.
- ✓ Conservare refrigerato.
- ✓ Consegnare al laboratorio il prima possibile.

✓ **DIAGNOSI PIÙ SEMPLICE, CAMPIONAMENTO NON INVASIVO E MAGGIORE BENESSERE ANIMALE.**