



SCHEDA PRODOTTO

# Prefer<sup>®</sup>

®



## Migliorate

la vostra tecnica d'inseminazione artificiale

con tecnologia **Prefer<sup>®</sup>**

+ VANTAGGI CON PREFER

### OTTIMA CONSERVAZIONE DEL SEME

materiale 100% riciclabile, nessun elemento in silicone.

### OTTIMO ANCORAGGIO DELLA SONDA

all'apparato genitale. Il catetere non cade durante la fecondazione anche con riempimenti del contenitore da 100 ml.

### FACILITA' D'UTILIZZO

Modello unico di sonda per scrofe e scrofette.

### RIDUZIONE DEI TEMPI DI FECONDAZIONE

+ del 50% di tempo risparmiato.

### CONTROLLO VISIVO DEL SEME PER TUTTA LA DURATA DELL'INSEMINAZIONE

Il contenitore del seme posto all'estremità della sonda, permette di verificare tutta la fase di fecondazione, controllarne i tempi e le corrette modalità.

### SVUOTAMENTO TOTALE DELLA SONDA

Nessun residuo di liquido seminale.

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER ITALIA

 **GENERALFARM**  
veterinaria e zootecnia

Via Umbria, 10 - 42122 Reggio Emilia - Tel 0522 514251 - Fax 0522 514376  
www.generalfarm.it - e-mail: generalfarm@generalfarm.191.it

  
**ECOPOR**



# MODALITA' D'USO DELLA SONDA **Prefer**<sup>®</sup>



SCHEDA PRODOTTO



- 1** PULIRE ACCURATAMENTE LA VULVA DELLA SCROFA MEDIANTE LA SALVIETTINA DISINFETTANTE PORCLEAN.



- 6** INTRODURRE L'ESTREMITA' DELLA SONDA NELL'APPARATO GENITALE.



- 2** CAPOVOLGERE IL CATETERE E AGITARE QUALCHE SECONDO IL CONTENITORE DEL SEME.




- 7** APRIRE COMPLETAMENTE LA CAMICIA SANITARIA.



- 3** ROMPERE IL TAPPO VERDE DI CHIUSURA ATTRAVERSO LA CAMICIA SANITARIA.



- 8** SE NECESSARIO, COMPLETARE L'INTRODUZIONE CON L'AIUTO DELL'APPOSITO SUPPORTO.

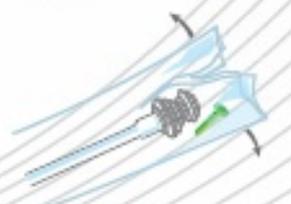


- 4** APRIRE LA CAMICIA SANITARIA UTILIZZANDO L'APPOSITA APERTURA ED ESTRARRE L'ESTREMITA' DEL CATETERE.



- 9** TEMPO D'INSEMINAZIONE 2 - 3 MINUTI CIRCA DAL CORRETTO POSIZIONAMENTO DEL CATETERE.



- 5** LUBRIFICARE L'ESTREMITA' DEL CATETERE CON GEL ECOGEL.

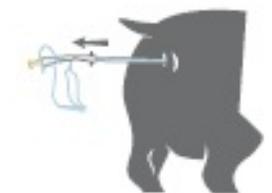

- 10** ESTRARRE DELICATAMENTE LA SONDA DALLA SCROFA.

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER ITALIA

**GENERALFARM**  
veterinaria e zootecnia

Via Umbria, 10 - 42122 Reggio Emilia - Tel 0522 514251 - Fax 0522 514376  
www.generalfarm.it - e-mail: generalfarm@generalfarm.it

