



## Decornatore elettronico a batteria

### Decornatore elettronico a batteria ricaricabile:


rimuove la gemma ovunque e senza accesso all'elettricità. Questo prodotto è particolarmente consigliato per i **vitelli fino a 3 settimane di vita**. È pronto per l'intervento con solo 4 secondi di preriscaldamento, e quindi la temperatura arriva **fino a 800 ° C**. Impiega solo 8 secondi per corno o gemma. Interrompe la crescita dei corni e controlla il sanguinamento mediante cauterizzazione del vaso sanguigno per minimizzare la potenziale infezione. Si possono decornare 50 vitelli prima che la batteria si scarichi. Viene fornito con valigia di custodia.

- **Tecnologia** a microprocessore integrata con controllo costante del calore e del tempo
- **calore** istantaneo, tempo di riscaldamento molto breve
- **veloce**: una velocità media di 8 secondi per corno
- **sicuro** per l'operatore da usare perché non c'è nessuna fiamma nuda e la ventilazione deflette il calore lontano dalla tua mano
- **portatile** a batteria quindi utilizzabile ovunque,
- **fornito** con 2 punte in ceramica (lame di riscaldamento incluse), 1 chiave esagonale (per rimuovere la testina), 1 batteria, 1 caricabatterie



 **GENERALFARM**  
veterinaria e zootecnia

**GENERALFARM** s.r.l. - Via Umbria, 32 - 42122 Reggio Emilia - Tel. 0522 514251 - Fax 0522 514376  
www.generalfarm.it - e-mail: info@generalfarm.it

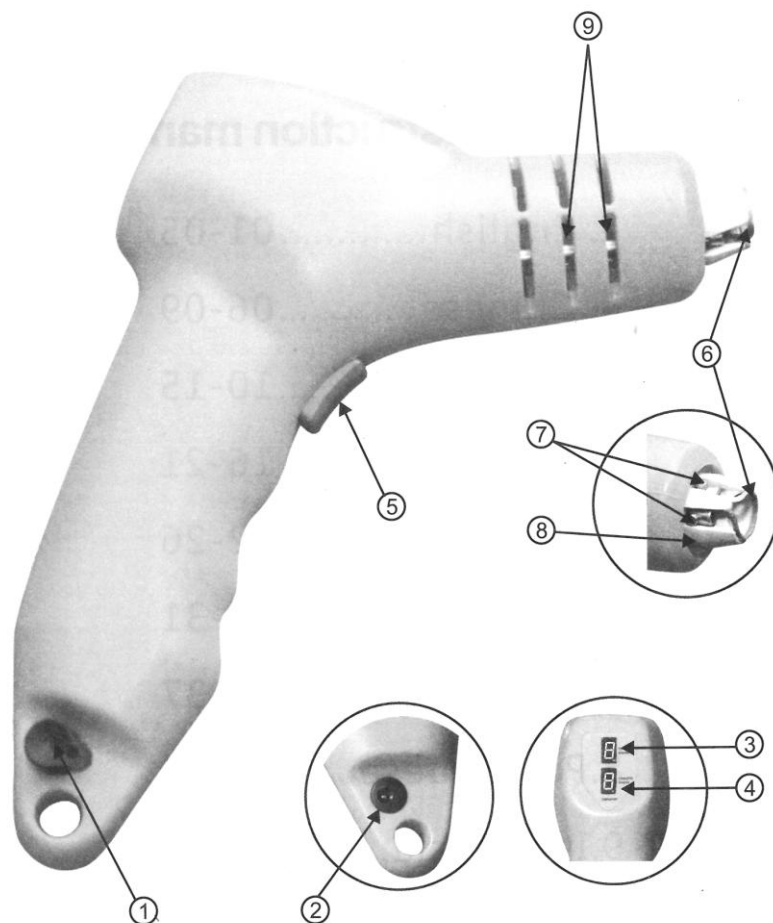

1 – Interruttore di sicurezza; una volta azionato questo, anche se premiamo il bottone di riscaldamento lo strumento rimane spento. Questo eviterà falsi inneschi. Quando lo strumento non è in uso va lasciato con la sicurezza inserita.

2 – presa di ricarica: utilizzare spinotto 5,5mm

3 – Display visualizzazione del tempo

4 – Display visualizzazione stato di carica

5 – Bottone start: lo strumento inizierà il riscaldamento non appena premuto

6 – Serpentina di riscaldamento: parte sostituibile

7 – Viti di fissaggio della serpentina

8 – Ceramica di sostegno serpentina: parte sostituibile

9 – Finestre di dissipazione del calore

 **GENERALFARM**  
veterinaria e zootecnia

**GENERALFARM** s.r.l. - Via Umbria, 32 - 42122 Reggio Emilia - Tel. 0522 514251 - Fax 0522 514376  
www.generalfarm.it - e-mail: info@generalfarm.it