

TEST RAPIDO DIARREA VITELLI



Quando hai bisogno di sapere con certezza se i tuoi vitelli soffrono di E. coli, Rotavirus, Corona virus o Criptosporidia, allora questo test fornisce la risposta.

Molto spesso si verificano infezioni multiple da diversi agenti patogeni insieme alle infezioni individuali.

Utilizzo del test:

- prendere un campione di diarrea e mescolarne 4/5 gocce con il fluido reagente in dotazione
- agitare e quindi posizionare la miscela sulla piastra di prova, 4/5 gocce per settore
- dopo ca. 10 minuti, hai rapidamente individuato l'agente patogeno in modo da poter adottare immediatamente le misure necessarie ed il trattamento più indicato

Maggiore affidabilità del trattamento e della sua pianificazione
Miglioramento del successo nella crescita dei vitelli.

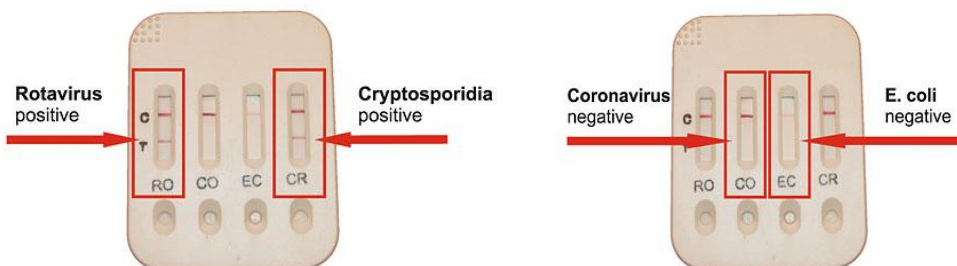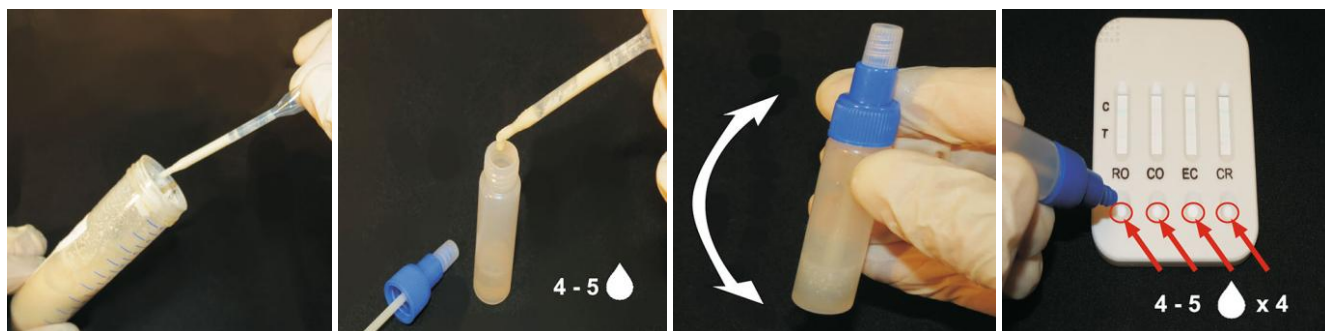

 **GENERALFARM**
veterinaria e zootecnia

GENERALFARM s.r.l. - Via Umbria, 32 - 42122 Reggio Emilia - Tel. 0522 514251 - Fax 0522 514376
www.generalfarm.it - e-mail: info@generalfarm.it